


## ボディスキャンシートマッサージャー TTM-2401

(愛称：実はひっそりしまえるんです。)

### 取扱説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

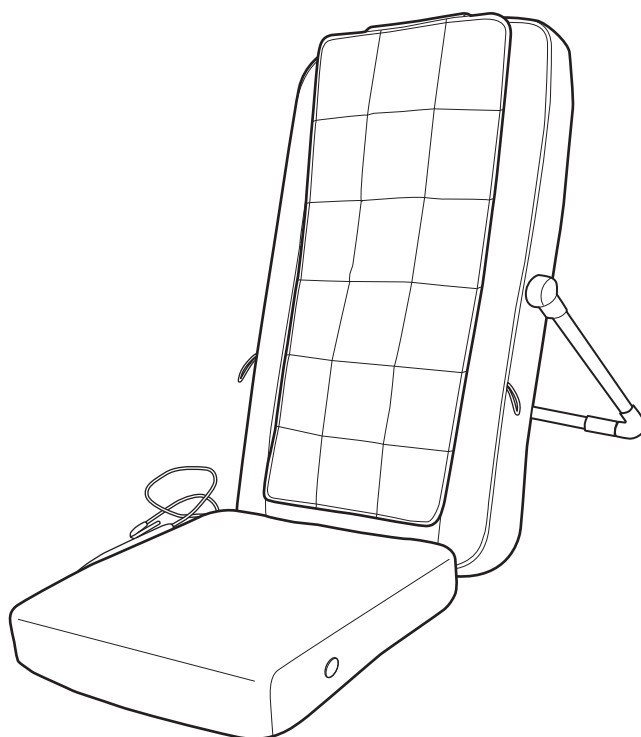



#### も く じ



安全上のご注意	..... P.2 ~ P.3	修理・サービスを依頼する前に	..... P.13
各部の名称とはたらき	..... P.4	仕様	..... P.14
正しい使いかた	..... P.5 ~ P.11	アフターサービスについて	裏表紙
お手入れと保存	..... P.12	保証書	裏表紙

# 安全上のご注意






- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかる拡大損害を示します。)





## 図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「ACアダプターをコンセントから抜くこと」を示します。)

# 警告

<div></div> <div>指示</div>	<div>医師の治療を受けている人や、次のような人は医師にご相談ください。</div> <div>●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人。</div> <div>●安静を必要とする人。●悪性腫瘍のある人。●心臓に障害のある人。</div> <div>●熱の高い人(38℃以上・有熱期)。(例:急性炎症症状倦怠(けんたい)感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき)</div> <div>●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性[疼痛(とうつう)性]疾患の人。</div> <div>●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。●かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人。</div> <div>●背骨(脊椎)に異常のある人または左右に曲がっている人。●特に身体に異常を感じているとき。</div> <div>●皮膚に創傷のある人。●糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある人。●けんしょう炎の人。</div> <div>●温度感覚喪失が認められる人。●使用しても効果が現れない人。●その他医療機関で治療中の人。</div>				
<div></div> <div>禁止</div>	<div>次のような人は使用しないでください。</div> <div>症状を悪化させるおそれがあります。</div> <div>●医師からマッサージを禁じられている人。</div> <div>例: 血栓塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など。</div>				
<div></div> <div>禁止</div>	<div>交流100V以外では使用しない。</div> <div>火災・感電・故障の原因になります。</div>	<div></div> <div>指示</div>	<div>異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。</div> <div>火災・感電の原因になります。</div>	<div></div> <div>プラグを抜く</div>	<div>お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。</div> <div>感電・火災・けがの原因になることがあります。</div>
	<div>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。</div> <div>火災・感電の原因になります。</div>		<div>ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。</div> <div>感電・ショート・発火の原因になります。</div>	<div></div> <div>分解禁止</div>	<div>分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。</div> <div>火災・感電・けがの原因になります。</div> <div>修理はお買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。</div>
	<div>電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</div> <div>感電・ショート・発火の原因になります。</div>		<div>ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。</div> <div>ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</div>	<div></div> <div>ぬれ手禁止</div>	<div>ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。</div> <div>感電の原因になります。</div>
	<div>子供に使用させない。また本体の上で遊ばせない。乗らせない。</div> <div>けがや故障の原因になります。</div>				
	<div>本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。</div> <div>感電・けがの原因になります。</div>	<div></div> <div>プラグを抜く</div>	<div>使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。</div> <div>絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</div>	<div></div> <div>水ぬれ禁止</div>	<div>水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。本体が濡れた状態では使用しない。湿度の高い環境では使用しない</div> <div>ショート・感電の原因になります。</div>

# 警告


 指示	<p>使用前に本体カバーが破れていないかを確認する。また、そのほかの部分にも破れがないか確認する。もし破れがある場合には、どんなに小さな破れでも、ただちに使用を中止し、勝手に修理などせず、修理を依頼する。</p> <p>布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。</p>	 禁止	<p>布団や毛布をかぶせたり、こたつで使用しない。</p> <p>内部の温度が上昇し、火災や事故、感電の原因になります。</p>	 禁止	<p>業務用として使用しない。</p>
 禁止	<p>本体に乗って立ったり、勢よく腰をおろしたりしない。</p> <p>けがや故障の原因になります。</p> <p>金属や燃えやすいものを近づけない。タバコを吸いながら使用したり、ストーブなどの火気の近くで使用したりしない。</p> <p>感電やショート、火災の原因になります。</p>		<p>改造しない。</p> <p>発火や異常動作、けがの原因になります。</p> <p>マッサージ以外の目的に使用しない。また頭、胸、腹、骨部へは使用しない。</p> <p>事故やけが、体調不良をおこすことがあります。</p> <p>本体カバーをはずさない。</p> <p>事故やけが、故障の原因になります。</p> <p>クルマでの使用はしない。</p> <p>事故やけが、故障の原因になります。</p>		<p>喉(のど)はマッサージしない。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p> <p>電源コードを束ねたままや巻きつけたまま使用しない。</p> <p>発火や発煙の原因になります。</p> <p>素肌や、衣服が濡れている状態で使用しない。</p> <p>けがや感電の原因になります。</p> <p>使用中は眠らない。</p> <p>無意識での使用は、からだへの異常やけがの原因になります。</p> <p>浴室など湿気の多い場所では使用しない。</p> <p>感電および故障の原因になります。</p>

# 注意


 指示	<p>ACアダプターをコンセントから抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。</p> <p>感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。</p> <p>1回の使用時間は15分以内にし、同一箇所への連続使用はさける。</p> <p>逆効果やけがのおそれがあります。</p> <p>使用中、からだに異常があらわれた場合は、ただちに使用をやめて、医師に相談する。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p> <p>動かなくなったり、異常が感じられたときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜く。</p> <p>感電・漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p> <p>熱を持ったり、異音がするときは、緊急停止させ、ACアダプターをコンセントから抜く。</p> <p>内部の故障、火災のおそれがあります。</p> <p>十分な強度・設置面のある床面・椅子・ソファに設置する。</p> <p>十分な強度・設置面がないと正しく使用できず、故障や事故の原因になります。</p> <p>使い始めは、弱い刺激でマッサージする。</p> <p>保存するときは、ACアダプターやリモコンのコード類のねじれをほどこしておく。</p>	 禁止	<p>この機器は、表面が熱くなるため、熱に敏感でない人、自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人には、使用させない。</p> <p>低温やけどや事故、けがの原因になります。</p> <p>ACアダプターは本品に付属しているもの以外は使わない。</p> <p>故障の原因になります。</p> <p>首のマッサージはしない。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p> <p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。</p> <p>変色・変形・感電・故障の原因になります。</p> <p>次のようなときは使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・疲労が激しいとき。</li> <li>・酒に酔っているとき。</li> <li>・湿疹が生じているとき。</li> <li>・食前、食後(それぞれ1時間)</li> </ul> <p>体調不良をおこすことがあります。</p> <p>直射日光が当たったり、高温になる場所に本体や付属品を置いたりしない。</p> <p>色あせ、熱による変形、故障の原因になります。</p> <p>皮膚に直接マッサージしない。</p> <p>けがや事故の原因になります。</p> <p>炎症や傷のあるところに直接使用しない。</p> <p>炎症や傷の悪化の原因になります。</p>	 禁止	<p>施療部位にアクセサリなど硬いものをつけて使用しない。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p> <p>他の治療器具と一緒に使用しない。</p> <p>事故やけが、体調不良を起こすおそれがあります。</p> <p>寝る前に使用しない。また貧血、貧血気味の人には使用しない。</p> <p>寝る前・貧血、貧血気味の人が使用すると、睡眠に悪い影響があることがあります。</p> <p>使用にかかわらず、本機の上での飲食はしない。</p> <p>感電や故障の原因になります。</p> <p>落としたり、強い衝撃を与えない。</p> <p>感電やショート、事故の原因になります。</p> <p>本体やスタンドに異常な負荷を与えない。</p> <p>一度に2人以上で乗るなど、本体に通常ではない負荷を与えないでください。故障や変形の原因になります。</p> <p>背中パッドは本品に付属しているもの以外は使わない。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p>
				 プラグを抜く	<p>停電のときには、ただちにACアダプターをコンセントから抜く。</p> <p>停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>

# 各部の名称とはたらき


## 本体

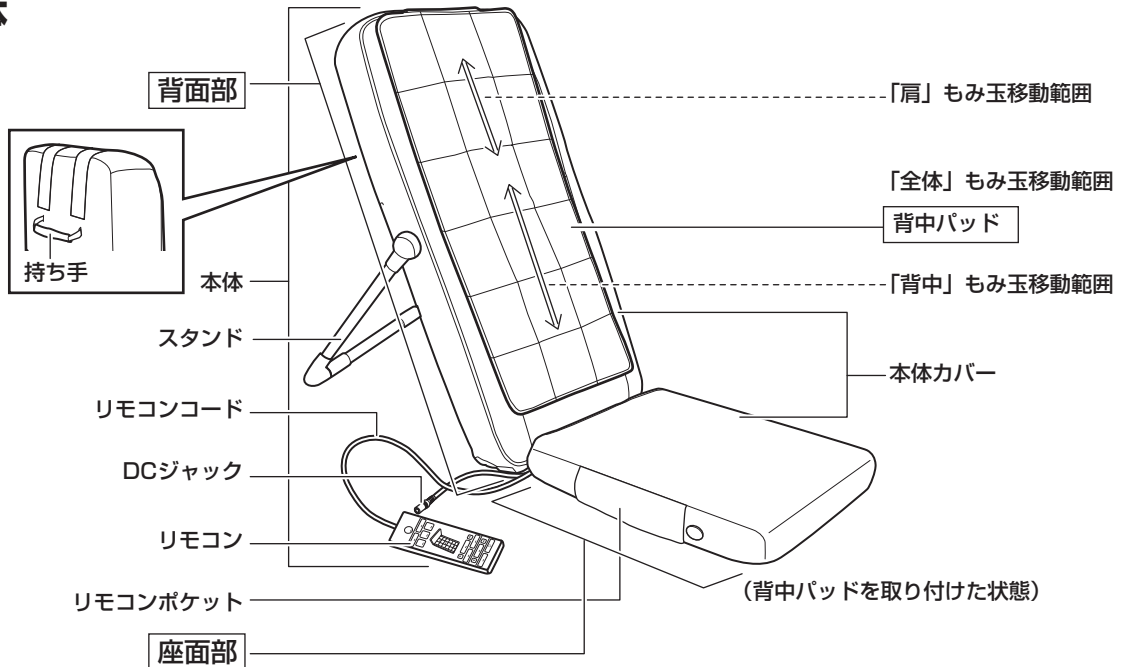

## リモコン

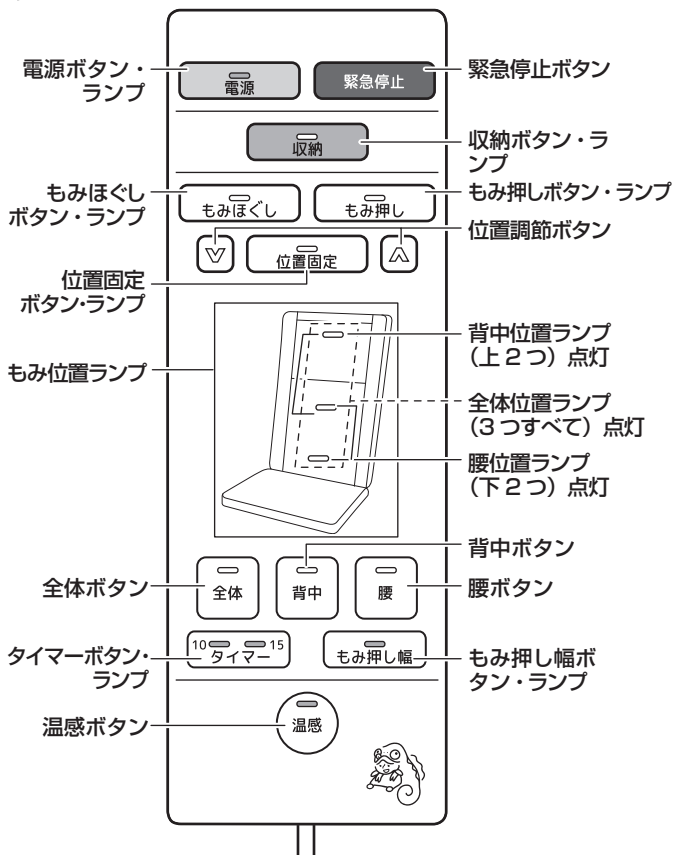


## 付属品 AC アダプター

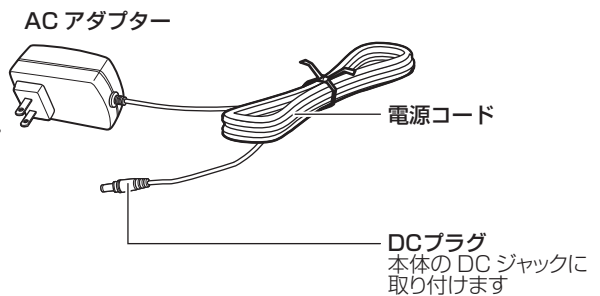

## 付属品 背中パッド

もみ玉が強い場合など、緩和させます。

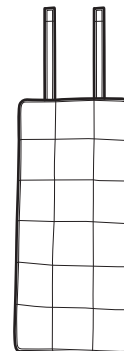

# 正しい使いかた

## 効果、効能

- ・ あんま、マッサージの代用
  - ・ 血行促進
  - ・ 疲労回復
  - ・ 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる
- ・ 筋肉の疲れをとる
- ・ コリをほぐす

## 使用目的

- ・ 一般家庭で使用するこ



### 警告

- ・ 本体に取り付けられている本体カバーをはずして使用しない。
  - ・ 使用前には、必ず本体に取り付けられている本体カバーが破れていないか確認する。
  - ・ 破れなどがあるときには、どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、絶対に使用しない。カバーが破れた場合は、使用を中止し修理を依頼してください。
  - ・ 他の治療器と同時に使用しない。
- 事故やけが、体調不良を起こす原因になります。

## 使用前の準備

右図のように、平面にスタンドを立ててスタンドを好みの角度に調節して使用します。

- ・ スタンドを使用せず背もたれのある椅子やソファなどに設置して使用することもできます（本機のスタンドが、椅子やソファの生地によっては傷つけることがあるため、生地の強度など確認し、必要なら強度に合わせてバスタオルを敷くなどして、傷つけないようにして使用してください）。



### 警告

回転する椅子やキャスターの付いた椅子など固定できない椅子には設置しない。  
電源コードがからまって転倒したり、断線したり、発煙・発火する原因になります。



## 1. 本体の本体カバーが確実に装着され、座面部や背面部に破れなどが無いことを確認する

- ・ もみ玉まわりなど注意して確認してください。
  - ・ 破れを発見したときは使用しないでください。
- ※ 本体カバー・座面部カバーの付けはずしはできません。

## 2. 座面部とスタンドを開いて設置する

右図のように座面部とスタンドを適当に開いて設置します。設置後、スタンドの開きかたで角度を調節してください。2段階に調節することができます（9ページ参照）。

※ 前方へ転倒しないようにご注意ください。



### 注意

- ・ テレビ、ラジオなどから2m以上離して設置する。  
雑音の原因になることがあります。
- ・ スタンドに手をはさまないように注意する。

### 椅子などに取り付けて使用する場合

- ・ 背中パッドを本体裏側にある面ファスナーに取り付けてください。
- ・ 椅子・ソファに使用するときには、本体背面部をたてかけて、使用してください。

### 設置できる椅子などの条件

- ・ 座面の幅45cm、奥行きが45cm、背もたれの高さが50cm以上ある
- ・ 十分な強度の背もたれがある（角度は約90度～110度推奨。90度のときは多少手前に出してたてかけるようにする）
- ・ 後方に転倒しにくい安定した形状の椅子であること
- ・ スタンドが当たっても大丈夫な素材でできていること。



### 注意


- ・ 十分な強度・設置面のある床面・椅子・ソファに設置する。  
十分な強度・設置面がないと正しく使用できず、故障や事故の原因になります。
- ・ 座面部の手前が浮いた状態で使用しない。  
座面の広い椅子を使用し、座面部はすべて椅子などにのせて、下に空間ができないようにして使用してください。椅子から落下したり、力をかけられず、効果が薄くなる原因になります。



# 正しい使いかた（つづき）

## 3. ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックとつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込む

ACアダプター、DCプラグとも確実に差し込んでください。

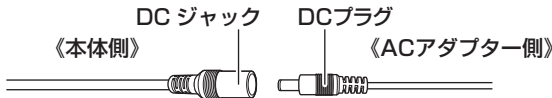

**注意** ACアダプターはコンセントの奥まで、DCプラグはDCジャックの奥まで、しっかり差し込む。

## 4. 電源ボタン、タイマーボタンなどが正常に作動するか確認する

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器が正常かつ安全に動作することを確認してください。

前回使用中に、緊急停止した場合やACアダプターを抜いた場合は前回停止した位置から動作が始まります。正しく終了させてから、再度電源を入れて使用を開始してください。



**注意** 万が一、本体内部から異音が聞こえたり、設定以上の熱を持ったときは、すぐに使用をやめてACアダプターをコンセントから抜く。けがややけどの原因になります。

## 基本的な操作のしかた



次のようなときは使用しない。  
 ・疲労が激しいとき ・酒に酔っているとき  
 ・湿疹が生じているとき  
 ・食前、食後(それぞれ1時間) 体調不良をおこすことがあります。  
 ・寝る前のとき ・貧血の人、貧血気味の人 睡眠に悪影響を与えることがあります。


## 1. 本機に座り、電源ボタンを押して電源を入れる

- 電源ボタンを押すと電源が入ります。
- 電源を入れると、電源ランプとタイマー15分ランプが点灯して肩位置スキャンを開始します。
- 収納位置にもみ玉が止まっていた場合、電源ランプともみ位置ランプが点滅し、所定の位置(背面部下方位置)にもみ玉が移動して停止します。



**注意** 1回の使用時間は15分以内とし、同一箇所への連続使用は避ける。揉み返しやけがのおそれがあります。

## リモコン

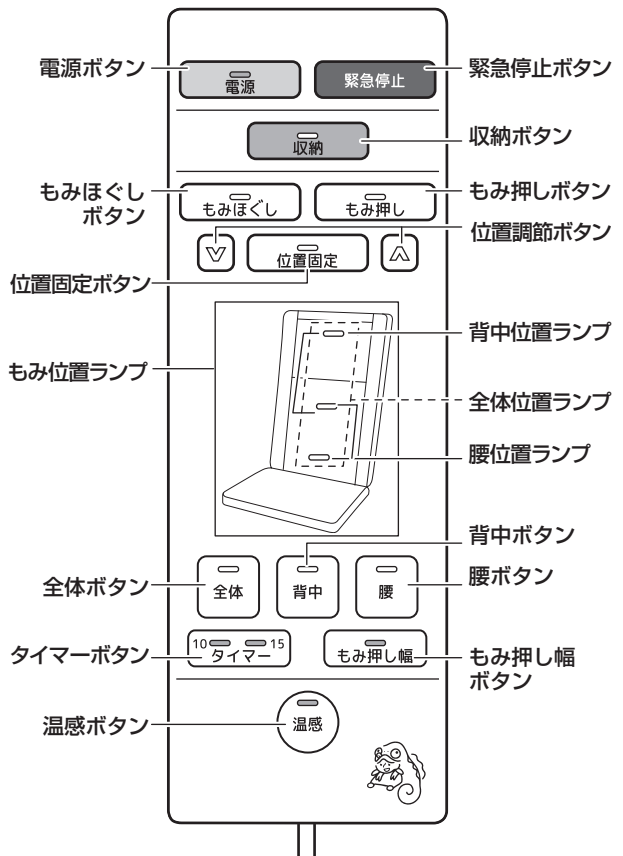

## 肩位置の自動設定

使用開始時は、肩の位置を検知するため、背中から首までをもみ玉が移動します。肩の位置を検知するとお知らせ音が鳴ります。

### 2. 使用中に気分が悪くなったり、異常動作をしたときには **緊急停止** 緊急停止ボタンで緊急停止させる

**緊急停止** 緊急停止ボタンを押すとすべての動きが瞬時に停止します。

再度動かすときには、一度 **電源** 電源ボタンを押すと、もみ玉が所定の位置(一番下)に戻り、電源が切れるので、再度 **電源** 電源ボタンを押して電源を入れるところから始めてください。

### 3. 《全体運転》もみ玉が下から上がってくるとき、多少深めに座り、本体に体を沈める

使用開始時は、首から背中まで全体をマッサージする全体モードになっています(背中位置ランプ・全体位置ランプ・腰位置ランプすべて点灯)。

※全体運転時、もみ玉が下から上がってくるときに、毎回、肩の位置をセンサーが感知して肩の高さを確認します。


### 4. 本機が肩位置を認識すると、お知らせ音が鳴り、「もみほぐし」が始まる

- ・正しく感知されると、もみ玉が肩の位置より上には行きません。
- ・深く座ったときの形状を見て判断しているため、浅く座った場合や、厚めの衣服を着用していると、正しく肩の位置を認識されず、もみ玉が肩の位置より上に行くことがあります。
- ・毎回センサーが働いて肩位置を確認していますが、2度目以降は、お知らせ音は鳴りません。

### 5. 《背中》《腰》《全体》もみ玉のマッサージ範囲をお好みに合わせて操作する

背中中心にマッサージしたいときは **背中** 背中ボタン、腰を中心にマッサージしたいときは、**腰** 腰ボタン押してください。再度、背中・腰両方に全体的に戻すときは **全体** 全体ボタンを押してください。

- ・押したボタンに合わせて背中位置ランプ・全体位置ランプ・腰位置ランプが点灯します。

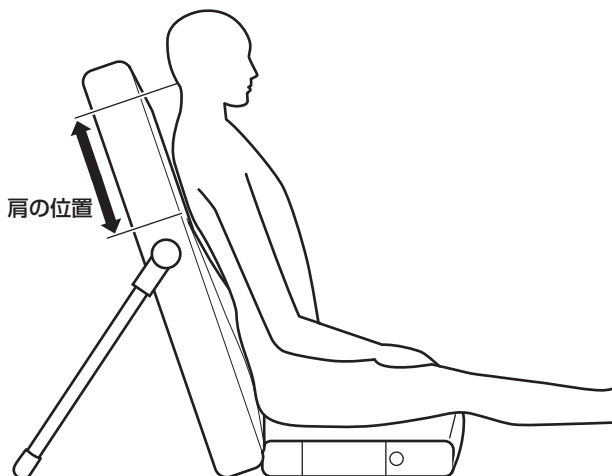

**注意** 首肩部に対する極度に強い刺激は避ける。  
逆効果やけがのおそれがあります。






**警告** 子供や自分で意思表示ができない人、体の不自由な人に使用させない。  
けがの原因になります。




# 正しい使いかた（つづき）

## 《もみ玉の位置の固定・上下移動》

### 6. もみ玉の位置を固定、上下させるときは、位置固定ボタンを押す

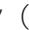
位置固定ボタンを押すと、位置固定ランプが点灯し、もみ玉の位置が固定されます。


- ・位置調節ボタン（ボタン・ボタン）のどちらかのボタンを押している間にもみ玉が上または下方向へ移動します。

※ 全体ボタン、腰ボタン、背中ボタンのいずれかを選択すると位置固定が解除されます。

## 《温感もみ玉の設定》

### 7. もみ玉の温感を使用するときは、温感ボタンを押す

温感ボタンを押すと、もみ玉に内蔵された赤ランプが点灯し、もみ玉に内蔵されたヒーターが稼働します（リモコンの温感ランプが点灯します）。

- ・温感の使用をやめるときは、温感ボタンを押してリモコンの温感ランプを消灯させます。


※ 本機の温感機能は温熱治療効果を目的としたものではありません（40℃程度の低めの温度です）。適度の使用をお願いします。




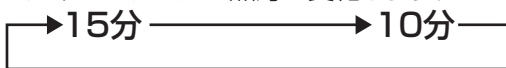
**注意** 温感ランプが点灯したもみ玉に、長時間同一箇所触れない。  
低温やけどの原因になります。

## 《タイマーの設定》


### 8. タイマーボタンでタイマー時間を設定する

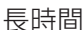長時間使用しつづけないために、タイマーボタンを押して、タイマー時間を設定します。


- ・タイマーボタンを押すたびに下記のようにタイマーランプの点灯が変化します。



### 9. 電源ボタンを押して、もみ玉が止まるのを確認してから、ACアダプターをコンセントから抜く


電源ボタンを押して電源を切ると、もみ玉は所定の位置（背面部の下方位置）に戻ります。もみ玉が動いているときは、ACアダプターをコンセントから抜かないでください。

## リモコン

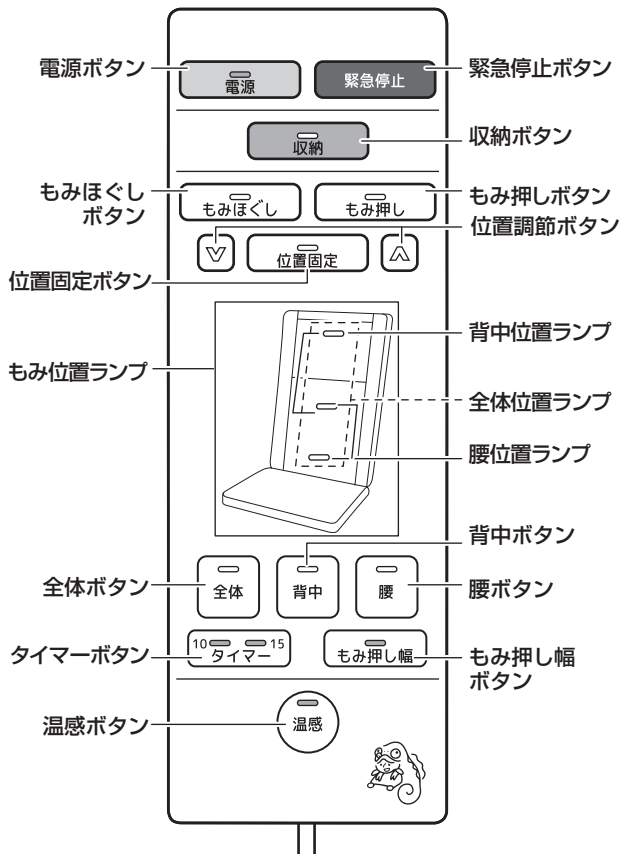






## 10. 収納するときは、 収納ボタンを押し、もみ玉を座面がたたみやすい位置まで移動させる

 収納ボタンを押すと収納ランプが点滅し、もみ玉が上方位置に移動します。

## 11. もみ玉が止まるのを確認してから、ACアダプターをコンセントから抜く

もみ玉が動いているときは、ACアダプターをコンセントから抜かないでください（「収納のしかた」11ページ）。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。</li> <li>• お手入れする際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。 感電、火災の原因になります。</li> </ul>
--	---

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• もみ玉が所定の位置に戻るまでは、 電源ボタンを押しても電源が入りません。</li> <li>• ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターを持って引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。</li> <li>• 電源コードを抜くときは、電源コードを持たずプラグを持って引き抜く。 コードを持って引き抜いたりするとコードに無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。</li> </ul>
--	--




## 12. リモコンポケットの利用

リモコンを入れておくことができます。

## 角度の調節

スタンドを2段階に調節して使用することができます。

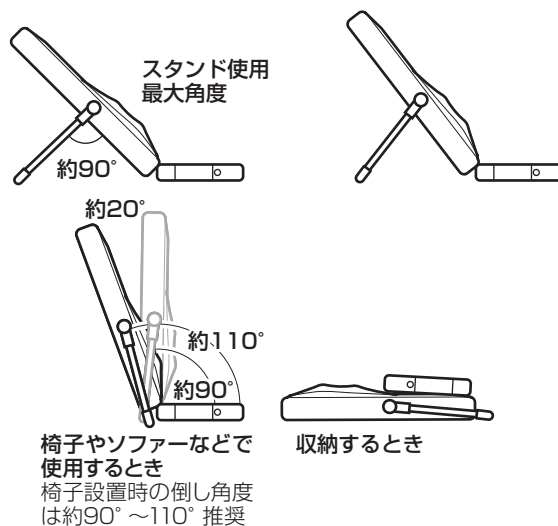

# 正しい使いかた（つづき）

## もみほぐしともみ押しの切り替え


「もみほぐし」は基本上下に動きつつもみほぐしていきます。  
「もみ押し」は上下させつつも、一点を同じように繰り返して押し続けます。

### 1. 「もみ押し」にするときは もみ押しボタンを押す






1回の使用時間は15分以内とし、同一箇所への連続使用は避ける。  
揉み返しやけがのおそれがあります。


### 2. もみ押し幅を設定するには もみ押し幅ボタンを押す

「もみ押し」のときは、「もみ押し幅」を変更することができます。  
 もみ押し幅ボタンを押すたびにもみ押し幅が変化します（最大幅と最小幅の間を行き来します）。

### 3. 「もみほぐし」にするときは もみほぐしボタンを押す

 全体ボタン、 背中ボタン、 腰ボタンでマッサージする位置を設定してください。


## リモコン

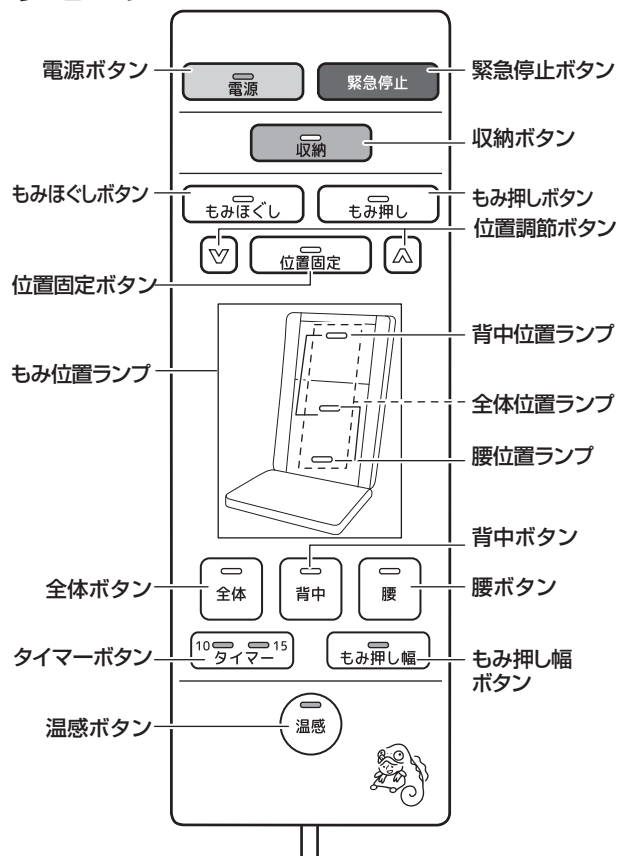

## 背中パッドの使いかた

背中パッドを使用することにより、マッサージ強度を調節することができます。マッサージが痛いと感じるときは、背中パッドを使用してください。本製品では本体カバーを取りはずして洗濯することができません。背中パッドを取り付けて使用することにより、本体の汚れ防止にもなります。付属の背中パッドは右図のようにして取り付けます。

### 1. 本体背面上部の面ファスナーに背中パッドを取り付ける

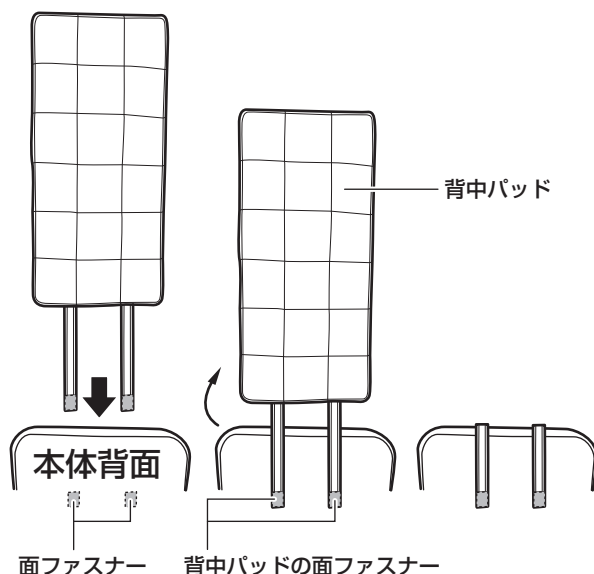

## 収納のしかた

使用したあとは安全のため、必ず次のように収納してください。

### 1. 収納ボタンを押してもみ玉を上に移動させる

### 2. ACアダプターをコンセントから抜く

本体のDC ジャックから AC アダプターの DC プラグを抜き、まとめておきます。

### 3. リモコンをリモコンポケットに入れる①


### 4. 座面部を内側に折りたたみ②、側面の固定輪で固定する③

### 5. スタンドを座面側に折りたたむ④

### 6. ホコリなどが付かないようにポリ袋に入れる

直射日光の当たらない、通気性の良い湿度の低いところに保存してください。

持ち手を持って移動させてください。

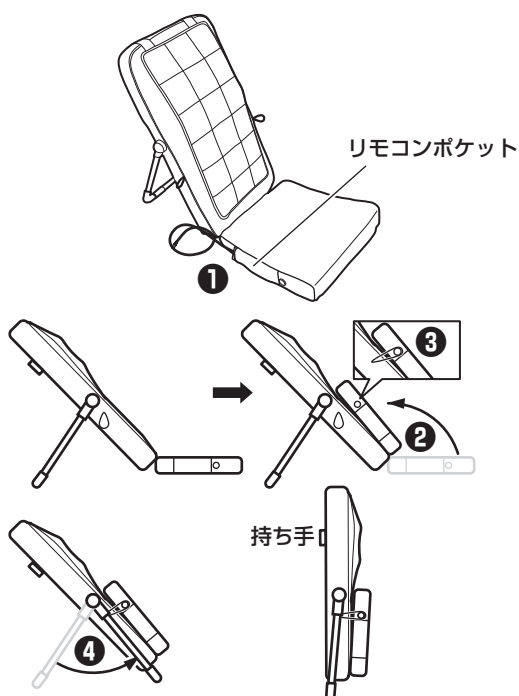

《収納状態》



# お手入れと保存

## 本体のお手入れ

本製品では本体カバーを取りはずして洗濯することができません。そのため、背中パッドを取りはずして洗濯し、本体は以下の手順で拭き取ってください。

- ①AC アダプターをコンセントから抜く
- ②背中パッドを本体から取りはずす
- ③本体をお手入れする

## 背中パッドのお手入れ

- ・洗濯タグにある洗濯表示を確認してください。
- ・背中パッドは手洗いすることができます。背中パッドの入る洗濯ネットに入れて洗ってください。
- ・乾燥機は使用せず、十分に脱水をして形を整えて風通しのよい日かげでつり干ししてください。

## お手入れのしかた



### 警告

- ・本体カバーは絶対取りはずさない。
- ・本体は絶対に水につけない。

- ・乾いた布でからぶきをしてほこりや汚れをふきとります。それでも落ちない汚れは、少し水分を含ませた布や食器用中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、からぶきで水分を落とします。
- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体は水をかけて洗わないでください。（感電・故障の原因になります。）

## 保存のしかた

- ・本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように清掃し、「収納のしかた」に合わせて収納し、湿気の少ないところに整理、保存してください。
- ・長期間使用されないときは、付着したごみや髪の毛など（カビや虫が発生する原因になります）を取り除き、ビニールなどをかけて、ホコリがつかないようにしてください。
- ・子供の手の届かないところに保存してください。

## 廃棄のしかた

- ・本機は一般ゴミでは捨てることができません。廃棄するときは、お住まいの自治体（都道府県、市区町村）の指示に従ってください。

# 修理・サービスを依頼する前に

**⚠警告** 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・コンセントに AC アダプターがしっかり差し込まれていない	AC アダプターをしっかりと差し込む
	・本体の DC ジャックに DC プラグがしっかり差し込まれていない	DC プラグをしっかりと差し込む
電源がすぐ切れる	・前回電源を切ったときにもみ玉が所定の位置に移動中だった	もみ玉が所定の位置にもどるまで待つて再度電源を入れる
マッサージ運転中に停止した	・タイマーによって最大約 15 分すぎると、自動的に停止します	再度電源を入れる
電源ボタンを押すと、もみ玉が移動して停止する	・前回使用時に緊急停止ボタンを押して停止させた	再度電源を入れて使用を開始する
ACアダプターをコンセントに差しただけで、もみ玉が移動する	・前回使用時に電源を「切」にせずに AC アダプターをコンセントから抜いた	もみ玉が所定の位置にもどるまで待つて再度電源を入れる
	・前回電源を切ったときにもみ玉が所定の位置に移動中だった	もみ玉は最初は所定の位置に戻るものなので、故障ではありません
電源を切るとモードが全体モードになる	・本機は電源投入時は全体モード、温感なし、所定の位置から始まるようになっています	故障ではありません
肩位置を認識しない	・深く座り、本体に体を沈めるようにしていない	体の形を本体に伝えるように、深く座り、体を沈めるようにする
	・厚い服・上着を着ている	薄い服に着替える・上着を脱ぐ（厚い服や上着を着ていると体の形状が本体に伝わりにくくなります）
	・背中パットを取り付けている	背中パットをはずす
背中を離れていると、肩位置が変わる	・毎回センサーで肩位置を確認しているため、背中を離れたときに肩の位置が判断できなかった（肩位置は、柔軟に対応するためにメモリーしていません）	電源を入れなおして、再度スキャンさせる
音がする	・構造上、音が発生するものなので、故障ではありません	故障ではありません
音が大きい	・通常よりも音が大きいときは、本体に乗ったり立ったりして負荷をかけ、内部に異常が発生した可能性があります	負荷をかけずに音が大きくなったのであれば、様子を見て、直らないようであれば、お客様相談室にご相談ください

## 長年ご使用の場合はよく点検を

### このような症状はありませんか？

- ・電源コードや AC アダプターが異常に熱い。
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、必ず販売店またはドゥシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

# 仕 様

## 仕 様

類 別	機械器具 77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDN コード 34662000)
販 売 名	ボディスキャンシートマッサージャー
型 番	TTM-2401
医療機器認証番号	302AGBZX00003000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。
電気定格	AC100V 50/60Hz 30W
定格消費電力	DC12 V 30W (ヒーター 5W)
電源コード長さ	約 1.8m
タイマー	自動オフ 10 分 15 分 切替可
外形寸法	背面部 : 幅 約 42.4 × 高さ 78 × 厚み 14cm 座面部 : 幅 約 41 × 奥行 41 × 厚み 9 cm
質 量	約 8.0 kg (AC アダプター含む)
材 質	(張地) 本体 : ポリエステル メッシュ生地 : ポリエステル、ナイロン 伸縮性生地 : ナイロン、ポリウレタン (本体内部) ABS樹脂、ポリプロピレン (座面内部) ウレタンフォーム (スタンド) スチール、ABS樹脂、シリコン
もみ回数	約 37 回 / 分
上下移動速さ	約 1.04 cm/ 秒
ヒーターの最高温度	背中部 : 50°C 以下
付 属 品	AC アダプター、背中パッド、取扱説明書・保証書
製造販売元	株式会社ドウシシャ 東京都品川区東大井 1-8-10
製造業者	XIAMEN COMFIER TECHNOLOGY CO.,LTD
原 産 国	中国

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)



# MEMO

# アフターサービスについて

## ●製品の保証について

1. この製品には保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はご購入の日から 1 年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## ●修理を依頼されるときは



### 警告

- ・故障のときは、ただちに使用をやめてコンセントからACアダプターを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ・ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

## ●補修用性能部品について

1. 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
2. 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 3 年間です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

製品についての  
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井カスタマーセンター

☎0120-104-481

【受付時間】 9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<https://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance/>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**

**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

